

1

BARELLE AUTOCARICANTI

Caricamento della barella

Portare la barella a contatto con il pianale mediante le ruote poste nella parte anteriore ed assicurarsi che siano sul pianale.



Quindi spingere la barella all'interno dell'ambulanza mantenendo le gambe posteriori a terra.



Impugnare prima la leva di sicurezza sinistra e poi la maniglia posta a destra della barella.



2

Bloccaggio del sistema di fissaggio



Portare avanti la barella fino a che le gambe posteriori non vengano a contatto con l'ambulanza




Ora con la mano sinistra impugnare la maniglia posta nella parte sinistra della barella e sbloccare le gambe posteriori.



A questo punto, si può iniziare a spingere la barella sul pianale fino al bloccaggio della stessa mediante il sistema di fissaggio certificato.

3

Sbloccaggio del sistema di fissaggio

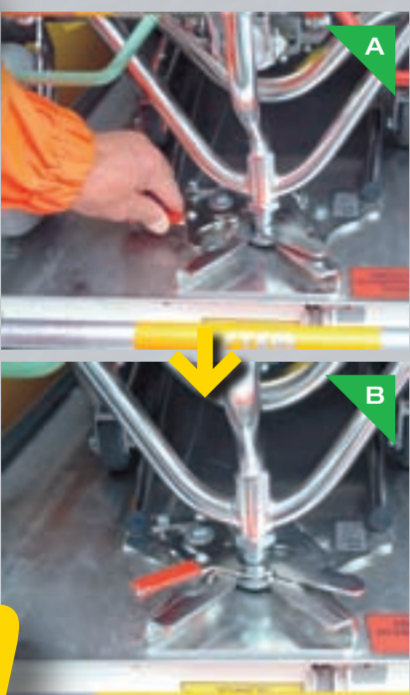

Fate ruotare la maniglia bloccabile verso di voi, portandola dalla posizione A alla posizione B



Ora che la barella risulta sbloccata, potete estrarla dal pianale

È importante che la posizione delle mani rispetti quella in figura

4

Scaricamento della barella

È di fondamentale importanza assicurarsi che durante lo scarico della barella vi siano sempre almeno 4/5 cm tra la base delle ruote e il pavimento. In caso contrario le gambe anteriori non avrebbero lo spazio per aprirsi provocando la caduta accidentale della barella



1

SEDIE PORTANTINE

Chiusura sedia portantina



Bloccare le ruote girevoli azionando il freno a pedale.



Portarsi a fianco della sedia ed impugnare le leve centrali con la mano destra



Sollevare il sedile in posizione verticale fino al blocco della sedia



Con la mano sinistra prendere il tubo nella parte anteriore della seduta e contemporaneamente stringere e abbassare le leve centrali di sblocco

2

Apertura sedia portantina



Portarsi a fianco della sedia, con una mano tenere la sedia, con l'altra impugnare le leve centrali. Stringere e sbloccare la sicura.



Accompagnare il sedile fino alla completa apertura



Nuovo Meccanismo di sblocco

